

GEEMARC  
**CLEAR SOUND® 1100**

**KOMFORTTELEFON MIT  
HÖRVERSTÄRKUNG UND  
HOCH-/TIEFTONREGELUNG**



## Benutzerhandbuch

**WARNUNG:** Dieses telefon wurde speziell für schwerhörige personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen bedürfnisse einstellbare hörerlautstärke. In folge dessen sollten alle nutzer darauf achten, dass der lautstärkereger des hörers, in rücksicht auf andere nutzer, auf das niedrigste niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende benutzer mit der handhabung dieser apparatur vertraut gemacht werden.

# INHALT

<b>Beschreibung</b>	3
---------------------	---

## **Aufbau**

Anschließen des Telefons	5
Einstellen des Klingeltons	5
Einstellung der Wählarten	7
Schalter für Einstellung der Flashzeit	8

## **Einstellen der Lautstärke sowie der Höhen und Tiefen**

Empfangslautstärke und –ton	9
Einstellung der Sendelautstärke	10

## **Benutzung des Telefons**

Annahme eingehender Anrufe	11
Einen Anruf tätigen	11
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer	11
R-Taste, Tasten * & #	12
Stummtaste	12
Speichern von Telefonnummern	12
Wählen einer gespeicherten Rufnummer	13


<b>Gewährleistung</b>	14
-----------------------	----

# BESCHREIBUNG


## 1 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



# BESCHREIBUNG

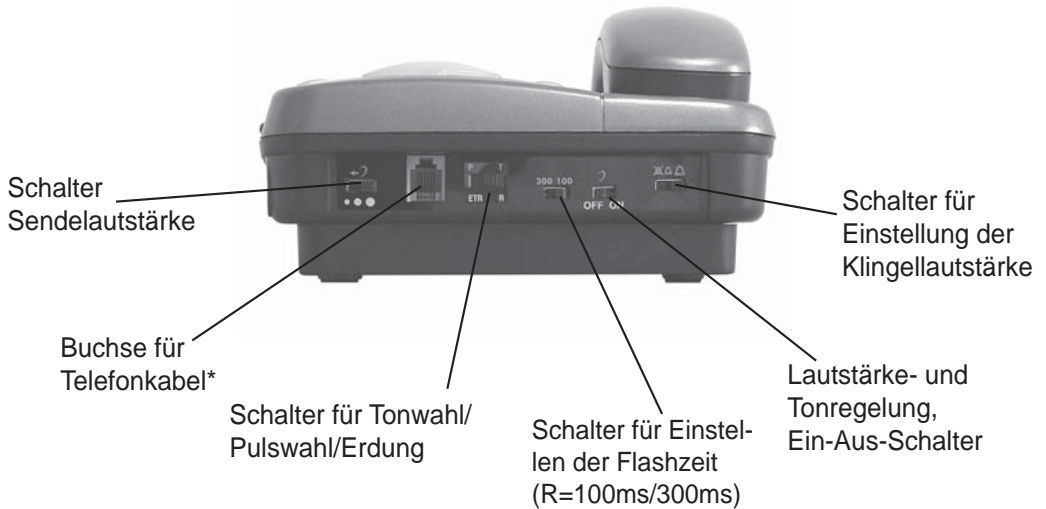

(\*) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

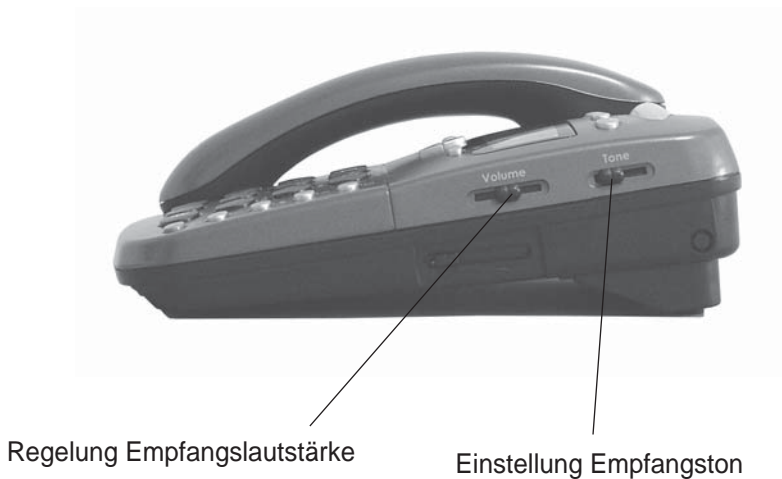

# AUFBAU

## 1 – ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

- 1 - Schließen Sie das Telefonhörer-kabel an.
- 2 – Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verschluss zurückziehen.
- 3 - Legen Sie 4 Micro (AAA 1,5 V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach ein (\*). Falls Sie die Klingellautstärke auf 10 dB erhöhen möchten, sind Batterien erforderlich.
- 4 - Lassen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder einschnappen.
- 5 – Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse (\*).

## 2 – KLINGELTONEINSTELLUNGEN

Ein Schalter an der rechten Seite des Gerätes ermöglicht die Einstellung des Klingeltons auf Hoch (HI), Niedrig (LOW) oder Aus (OFF).



Aus (OFF)



Niedrig (LOW)



Hoch (HI)


(\*) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

# AUFBAU

Das Telefon ist ab Werk auf die Klingellautstärke „hoch“ und die Melodie „6“ eingestellt.

	Niedrig	Mittel	Hoch
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (voreingestellt)
Melodie 3	7	8	9

Wenn Ihnen die Klingeltonmelodie nicht gefällt, können Sie durch Änderungen an der Einstellung, wie unten beschrieben, eine neue auswählen:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste #.
- Drücken Sie eine der Tasten 1 - 9.


Die neuen Klingeltoneinstellungen werden mit dem nächsten eingehenden Anruf aktiviert.

**Hinweis:** Wenn Sie in das Batteriefach Batterien einsetzen, kann die Klingeltonlautstärke auf bis zu 10 dB erhöht werden.

# AUFBAU

## 3 – EINSTELLUNG DER WÄHLARTEN

Der Schalter ETR/PR/T befindet sich auf der rechten Seite mancher (englischer) Modelle. Wenn Sie Ihr CL1100 an ein öffentliches europäisches Telefonnetz anschließen möchten (PBX), stellen Sie den ETR/PR/T-Schalter auf Position 3 (T). Dadurch wird die optimale Funktion Ihres Telefons für die meisten (99%) Telefonanlagen sichergestellt.

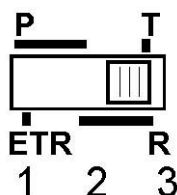

Positionen:

### **Position 1:**

Pulswahl. Die R-Taste ist geerdet. Diese Option kann nur innerhalb Großbritanniens und in ganz besonderen Fällen verwendet werden.

### **Position 2:**

Pulswahl. Die R-Taste ist gemäß der Regelung eingestellt (siehe „Einstellung der Flash-Zeit für die R-Taste S. 8

### **Position 3:**

Tonwahl. Die R-Taste ist gemäß der Regelung eingestellt (siehe „Einstellung der Flash-Zeit für die R-Taste S. 8

# AUFBAU

*Wenn Sie Ihr CL1100 mit einem Hörgerät verwenden, stellen Sie Ihr Hörgerät auf die Position T.*

## 4 – SCHALTER FÜR DIE FLASH-ZEIT (300/100)

---


Überprüfen Sie die Einstellung der Flash-Zeit Ihres CL1400. Für Deutschland sollte der TBR-Schalter auf 300 mS gestellt werden. In anderen Ländern oder bei Problemen beim Verbinden bei Telefonanlagen kann die Flashzeit auch auf 100 mS gestellt werden.


# EINSTELLEN DER HÖRERLAUTSTÄRKE, SOWIE DER HÖHEN UND TIEFEN


## 1 - EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE UND DER HÖHEN UND TIEFEN


---

Sie können die Empfangslautstärke erhöhen und die Höhen und Tiefen entsprechend Ihrer Erfordernisse einstellen.

Mit der Taste  können Sie die Hörerverstärkung, sowie die veränderten Höhen und Tiefen während des Gesprächs aktivieren und deaktivieren.


Die Ton- und Lautstärkeeinstellung (15dB bis 30dB) ist nur aktiviert , wenn der Schalter hinten an Ihrem Telefon auf ON gestellt ist. Wenn diese Taste auf OFF gestellt ist, kann die Lautstärke nur von 0dB bis 15dB verstellt werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet das rote Licht für die Hörerverstärkung und die Einstellung der Höhen und Tiefen neben der Taste  auf.

**Hinweis:** Wenn der Ton (Höhen), die Hörerlautstärke und die Sendelautstärke auf Maximum stehen, kann ein Pfeifen auftreten. Wenn ein Pfeifen auftritt, sollte die Sendelautstärke mit dem Schalter  reduziert werden.

# EINSTELLEN DER HÖRERLAUTSTÄRKE, SOWIE DER HÖHEN UND TIEFEN

Verwenden Sie die Tasten **TONE** und **VOLUME**, um das Niveau gemäß Ihren Erfordernissen optimal einzustellen.

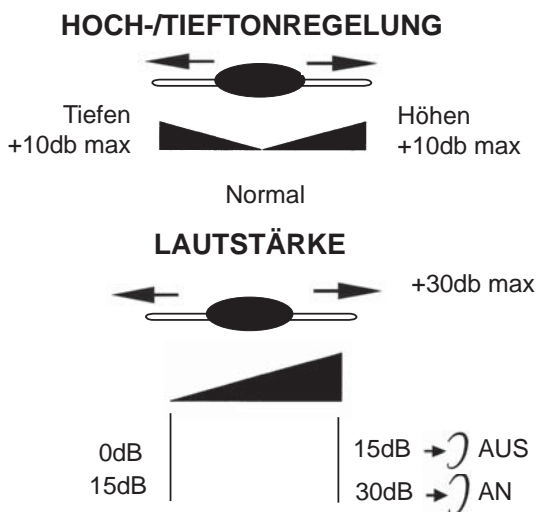

## 2 – EINSTELLUNG SENDELAUTSTÄRKE

Wenn ihre Stimme zu leise ist oder die angerufenen Personen Schwierigkeiten haben, Sie zu verstehen, können Sie die Sendelautstärke mit dem Schalter rechts an Ihrem Gerät erhöhen. Wenn notwendig, können Sie die Sendelautstärke auch reduzieren.



# BENUTZUNG DES TELEFONS

## 1 – ANNAHME EINGEHENDER ANRUF

---

- Während eines eingehenden Anrufs klingelt das Telefon und das Lichtsignal für eingehende Anrufe blinkt. Um den Anruf anzunehmen, heben Sie den Hörer ab und sprechen.
- Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer behutsam wieder auf, um die Leitung freizugeben.


## 2 – EINEN ANRUF TÄTIGEN

---

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer wieder auf.

## 3 - WAHLWIEDERHOLUNG

---

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die Taste 
- Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch noch einmal gewählt (gilt nicht für Direktwahlkosten).

# BENUTZUNG DES TELEFONS



## 4 – R-TASTE, TASTEN \* & #

---

Diese Tasten werden für verschiedene Dienste Ihres Serviceproviders verwendet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für nähere Informationen.

## 5 - STUMMTASTE


---

Wenn Sie sich mit einer anderen Person im Raum unterhalten möchten, ohne dass Ihr Gesprächspartner das mitbekommt, drücken und halten Sie die Taste . Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, dieser kann Sie allerdings nicht hören. Um das Gespräch wieder normal weiterzuführen, lassen Sie die Taste  wieder los.


## 6 – SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN

---

Ihr Telefon CL1100 verfügt über 12 Direktwahlspeicherplätze. Um eine Nummer zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie **M1**, **M2**, ... **M12**, um die Nummer auf den jeweiligen Tasten zu speichern.

# BENUTZUNG DES TELEFONS

- Wählen Sie die Nummer.
- Drücken Sie die Taste  erneut.

Wenn Sie Ihr Telefon ausstecken, gehen die Nummern nach ein paar Stunden verloren. Wenn Sie in eine neue Nummer einspeichern, wird die vorher auf dieser Taste gespeicherte Nummer automatisch gelöscht.

## 7 – EINE GESPEICHERTE NUMMER ANWÄHLEN

- Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
- Drücken Sie eine der Tasten **M1, M2 ... M12**, die auf dieser Taste gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt. Damit Sie die gespeicherten Telefonnummern behalten, können Sie die Tabelle auf Ihrem Telefon verwenden.

# GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc ein Jahr Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc- Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

**WICHTIG: IHR KASSENBON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN. ERKLÄRUNG:**

Geemarc Telecom AG erklärt hiermit, dass diese Produkt gemäß der erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- undTelekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

**Stromversorgung:** Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „hazardous voltage“ gemäß des EN60950 Standards) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/Aus-Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz an oder ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

**Telefonverbindung:** Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß dem EN60950 Standard klassifiziert.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für den Produktsupport oder zur Hilfe besuchen Sie unsere Webseite

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Telefon: 01707 384438

Fax: 01707 372529